




EASYCUT

INSTRUMENT DE LIBERATION
DU CANAL CARPIEN

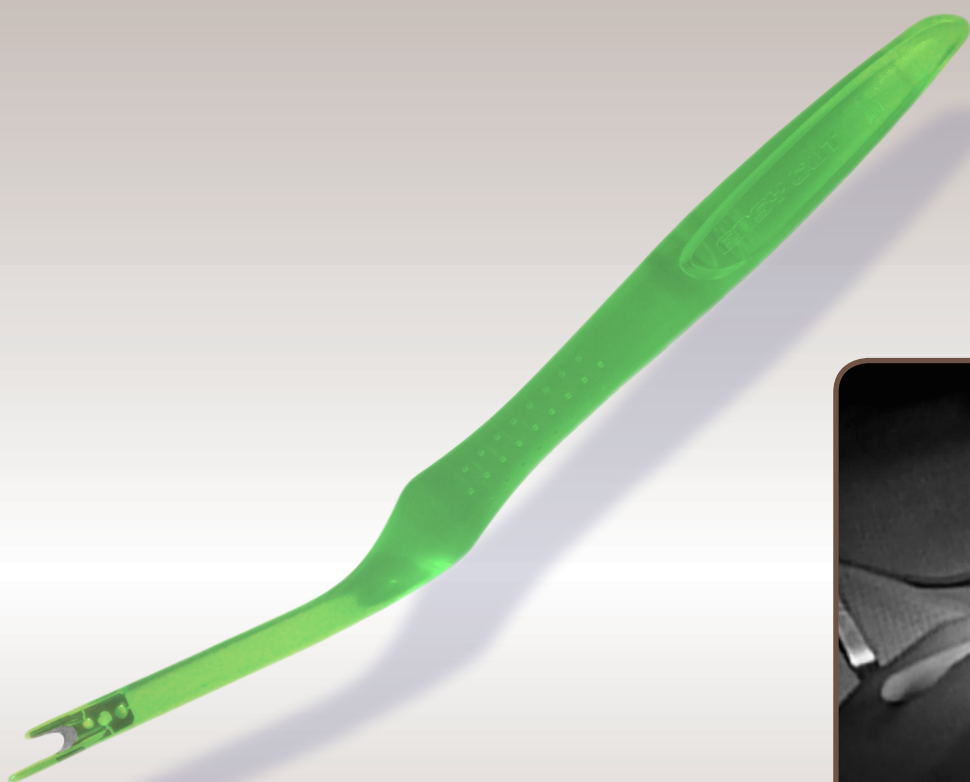

*Mini-invasif, simple,
en toute sécurité*



EASYCUT


L'instrument de libération du canal carpien EASYCUT est conçu pour la section du ligament annulaire antérieur du carpe par voie mini-invasive.

Avantages

- ✓ Précision de coupe (lame inox de 0,4mm d'épaisseur),
- ✓ lame concave spécialement adaptée à la coupe du LAAC,
- ✓ Sécurité de coupe grâce aux tiges de protection autour de la lame (protection des nerfs et des vaisseaux, détection de l'extrémité du ligament)
- ✓ Geste maîtrisé grâce à l'ergonomie du couteau et sa zone de grip,
- ✓ Coupe longitudinale facilitée par l'inclinaison du manche.

Principe d'utilisation

- ✓ Positionnez la main paume vers le haut,
- ✓ Réalisez une incision cutanée de 1 à 2cm au niveau de la paume,
- ✓ Ecartez et décollez les tissus et la graisse afin de visualiser le LAAC, les nerfs et les vaisseaux à proximité,
- ✓ Incisez légèrement le LAAC avec un scalpel afin d'amorcer la coupe,
- ✓ Introduire le couteau sous la peau, de sorte que les tiges de protection soient de part et d'autre du ligament, et que la lame soit positionnée dans l'amorce,
- ✓ Poussez sur le couteau jusqu'à section totale du LAAC,
- ✓ Retirez et jetez le couteau,
- ✓ Refermez l'incision cutanée.

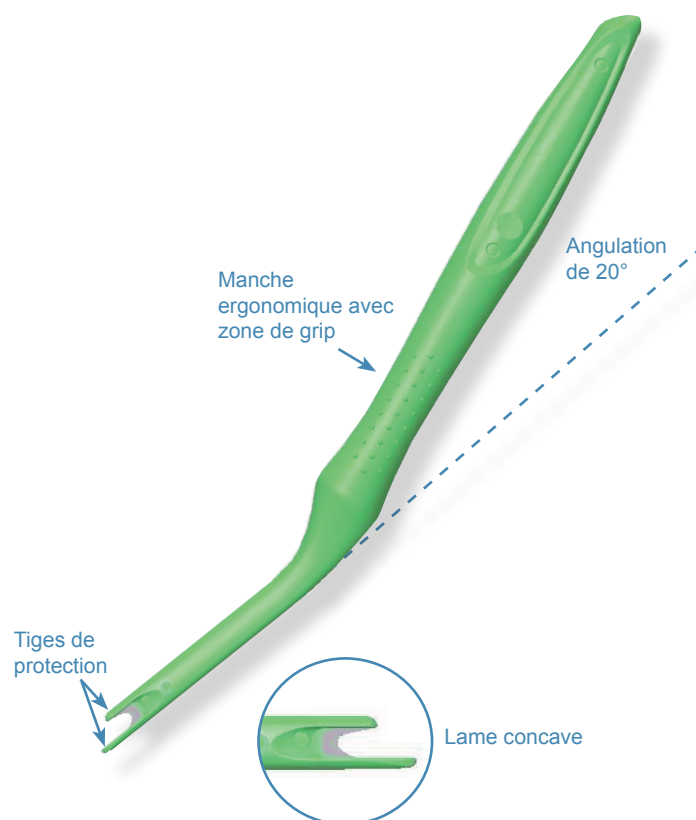

Référence et caractéristiques techniques

Référence : EC01S

Matériel: MABS (polymère biocompatible USPVI, ISO10993) + lame Inox

*Instrument à usage unique
Livré stérile sous sachet et blister*



Campus de Ker Lann
Rue Blaise Pascal
35170 Bruz - FRANCE
Tél +33(0)2 99 05 59 69
Fax +33(0)2 99 05 95 62
info@memometal.com
www.memometal.com
Implant breveté
FDA approved